

Памятка по эксплуатации универсальной пробной оправы ТФ-3

Срок службы универсальной пробной оправы зависит от аккуратного и бережного обращения с ней.

Не прилагайте больших усилий при настройке и регулировке её частей под анатомические особенности пациента.

Особенно уделите внимание регулировке положения носового упора оправы. Для изменения положения упора открутите винт большего диаметра на 2-3 оборота, для ослабления усилия перемещения носового упора.

Винтом малого диаметра установите корректное положение упора, затем аккуратно и плотно заверните по часовой стрелке винт большего диаметра, для фиксации положения. **Не заворачивайте винт большего диаметра слишком сильно!**

Абсолютно недопустимо вращение винта малого диаметра, при затянутом контрольном винте большего диаметра! Это приведёт к выходу из строя механизма регулировки!