



4. Правила пользования.

С линзой можно работать как в освещенном, так и в затемненном помещении. Освещение глазного дна осуществляется щелевой лампой, офтальмоскопом или стационарным источником света.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Линза L15D
соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Гарантия на изделие 12 месяцев со дня продажи.

Инспектор качества _____

ЛИНЗА 15 ДИОПТРИЙ

(Из комплекта КЛЮ-1)

Паспорт

Производитель: ООО "Поиск ТР"
РУ ФСР 2009/05686 от 06.08.2018
Сертификат соответствия 0015896 от 26.09.2018

Поверке не подлежит в соответствии
с письмом Росздравнадзора 29.03.2007 г. N 01И-231/07

г. Москва

2020

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Линза 15 дптр. обеспечивает изображение сетчатки очень высокого разрешения с использованием бинокулярного непрямого офтальмоскопа во время клинической практики.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Комплект КЛЮ-1 состоит из четырех самостоятельных линз L15D, L20D, линзы Гольдмана и гониоскопа Ван-Бойнингена.

Одну из них (L15D) Вы держите в руках.

Технические характеристики линзы L15D.

Размеры, мм x мм	61x16.5
Увеличение	4.4 x
Поле зрения, °	45
Материал линзы	Оптическое стекло К-8
Световой диаметр, мм	53
Фокусное расстояние, мм	67.0
Масса, г	66

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

3.1. При работе с линзой необходимо держать ее за оправу, не касаясь оптических поверхностей.

3.2. Линзу следует оберегать от ударов и механических повреждений, а оптические поверхности линзы - от царапин и загрязнений.

3.3. Во время перерывов в работе линза должна находиться в футляре.

3.4. Пыль с поверхности линзы следует смахивать беличьей или колонковой обезжиренной кисточкой.

3.5. Оптические поверхности допускается чистить спирто-эфирной смесью (85% спирта и 15% эфира) согласно ОСТ -3-64.19-88.