



Инструкция по эксплуатации пробной универсальная оправы ALMAS STF 4860

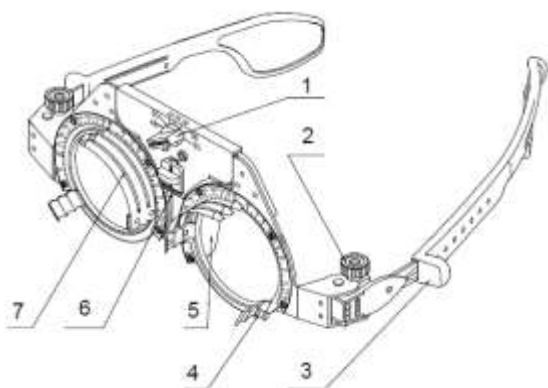


- 1 – ручка для настройки межцентрового расстояния
- 2 – ручка для регулировки угла заушника
- 3 – заушник
- 4 – ручка настройки оси
- 5 – носопор
- 6 – ползунок регулировки носопора
- 7 – ручка вращения линзы

1) Регулировка межцентрового расстояния

Для регулировки межцентрового расстояния, поверните ручку 1, для выставления нужного значения.

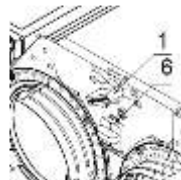


2) Регулировка заушника

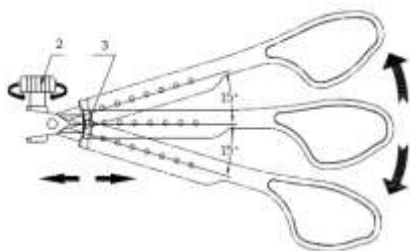

Потяните заушник 3, для выставления нужной длины. Поверните ручку 2 для регулировки угла заушника.

3) Регулировка носопора

Установите носопор в соответствии с носом пациента ползунком регулировки носопора 6. Поверните гайку для блокировки перемещения носопора 2. Расширьте или сузьте носопор 5 для регулировки ширины.

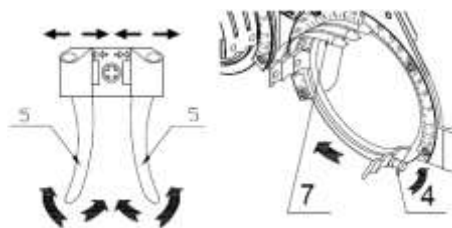

4) Регулировка оси астигматизма и косоглазия

После установки цилиндрической или призматической линзы в держатель 7, поверните ручку 4 для настройки оси.