

АО «Можайский медико-инструментальный завод»

## МАГНИТ ГЛАЗНОЙ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЛИТОЙ МГМЛ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № ФСР 2008/01665 от 07.02.2008 г.

### ЭТИКЕТКА НАЗНАЧЕНИЕ

Магнит предназначен для быстрого и эффективного извлечения из глаза ферромагнитных тел.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Магнитная секция	-1 шт.
2. Наконечником № 1	-1 шт.
3. Наконечником № 2	-1 шт.
4. Футляр-магнитопровод	-1 шт.
<u>Эксплуатационная документация</u>	
5. Этикетка	-1 экз.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры, мм:

Магнитная секция

-диаметр и длина -35x53

-диаметр присоединительного конуса -10,5

Наконечники

диаметр рабочих концов наконечников

- № 1 -1,0

- № 2 и № 3 -0,5

длина наконечников

- № 1 и № 2 -16,0

- № 3 -29,0

диаметр присоединительного конуса -10,0

Магнит изготовлен из магнитного сплава, оболочка – из ударопрочного полистирола или из силиконовой резины, наконечники и футляр-магнитопровод – из углеродистой стали с гальваническим покрытием.



## ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Наконечники устойчивы к воздушной дезинфекции при температуре  $(120 \pm 3)$  °С в течении  $(45 + 5)$  мин, предстерилизационной очистке в моющем растворе (5 г препарата «Биолот» и 995 см<sup>3</sup> воды питьевой) и воздушной стерилизации при температуре  $(180 \pm 2)_{10}$  °С в течение  $(60 + 5)$  мин.

Магнитная секция устойчива к дезинфекции в 3% растворе перекиси водорода при температуре не менее 18°С в течение  $(360 \pm 5)$  мин.

## ХРАНЕНИЕ

Храниться набор должен при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Магнит соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК № 1

Упаковщик № 1

Дата выпуска

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие магнита требованиям технических условий ТУ 9434-121-07613473-2007 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения) в соответствии с указанием настоящей этикетки.

Гарантийный срок эксплуатации набора - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Претензии предприятию-изготовителю предъявляются в установленном порядке при возврате дефектных наборов с данной этикеткой по адресу:

143220, Московская область, Можайский р-он,

п/о Марфин Брод, АО «Можайский МИЗ»

Интернет: [www.mmiz.ru](http://www.mmiz.ru)