



Рисунок 1.

Перед сборкой и проверкой необходимо установить объект на постоянное место, и используя ключ 17 мм отрегулировать пять опор основания поз.7, обеспечив их одновременное плотное прилегание к поверхности пола.

Порядок сборки. (см.рис.1)

1. Отвинтить поз.4 гайки скоб-держателей поз.5 трубы поз.2 в крайнее положение и выровнять скобы.
2. Опустить вертикально трубу поз.2 с закрепленным на ней кронштейном поз.6 и надетой декоративной втулкой поз.3 через отверстие в стеклянной панели тумбы так, чтобы верхняя кромка желтой метки на трубе находилась на уровне плоскости стеклянной панели или чуть ниже.
3. Затянуть гайки на скобах, сориентировав кронштейн поз.6 в необходимом положении.
4. Передвинуть декоративную втулку поз.3 вниз по трубе поз.2 до стеклянной панели не прикладывая больших усилий.
5. Соединить стойку светильника поз.1 и трубу поз.2, предварительно опустив через нее кабели с электрическими разъемами.
6. Соединить электрические разъемы тумбы с разъемами кабелей светильника.
7. Установить и закрепить боковую панель с помощью 4 крепежных винтов М4, предварительно вывернув их из гнезд, используя отвертку с крестообразным шлицем.
7. Привинтить кресло к фланцу подъемного механизма четырьмя гайками М8 с шайбами, используя ключ 13 мм.
8. Подсоединить сетевой кабель к входному гнезду на задней стороне тумбы и включить выключатель в положение 1. выключатель должен засветиться.
9. Проверить работу лифта кресла, поочередно нажимая правые кнопки на передней панели. (возможны паузы включения 1-2 сек.)
10. Нажать левую кнопку на передней панели. Должен включиться светильник.
11. Повернуть центральную ручку регулятора освещения. Яркость освещения должна меняться.
12. Нажать левую кнопку на передней панели. Светильник выключится.

Сборка проверка закончена.